

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Portable Dental X-ray System, DEXCO Co., Ltd



PORTABLE DENTAL X-RAY SYSTEM
www.cdpdesign.com.hk

портативный стоматологический рентген-аппарат

MODEL : DX3000

med|dent
Expert of Dental Digital Equipment

Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации

ООО «Мед-Дент»

www.dexcowin.ru med-dent@bk.ru

(925) 514-38-81, (495) 780-61-62

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор лучшего в своем классе портативного дентального рентген - аппарата «DX-3000» от компании «DEXCOWIN, Ltd.» (Корея)

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации до того, как Вы начнете использовать в своей работе портативный дентальный рентген-аппарат «DX-3000».

Настоящая инструкция подробно описывает технические параметры прибора с тем, чтобы Вы могли понять принципы его работы.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- самый легкий и компактный портативный рентген-аппарат в мире (вес нетто – 1,5 кг.)**
- микропроцессорное управление параметрами съемки**
- высокочастотный генератор инверторного типа**
- более 300 снимков на одном заряде аккумулятора**
- работа, как с пленкой, так и с цифровыми приемниками изображения (радиовизиографами)**
- одно зарядное устройство и аккумулятор в комплекте**
- использование в рентгенодиагностике малодозовой технологии**
- не требует специального монтажа и настройки оборудования**

Creative Innovation and Technology

DEXCOWIN

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Портативный стоматологический рентген-аппарат «Dexcowin» состоит из следующих составляющих:

A - генератор рентгеновского излучения в/ч типа «DX-3000» - 1 шт.

B - аккумуляторная батарея типа PF435060HP-4S – 1 шт.

C - подставка для заряда аккумулятора – 1 шт.

D - блок питания для зарядного устройства – 1 шт.

E - сетевой шнур для зарядного устройства – 1 шт.

F - пульт для дистанционного управления – 1 шт.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за выбор портативного стоматологического рентген-аппарата «DX-3000». Данный аппарат может использоваться не только для работы с рентгеновской пленкой, но и с различными видами радиовизиографических систем (цифровыми сенсорами). При использовании данного аппарата руководствуйтесь, пожалуйста, следующими рекомендациями:

- настоящий рентген-аппарат имеет один из самых невысоких показателей лучевой нагрузки из всех аппаратов данного класса. Однако в своей практике **ВЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!**

- в целях корректной эксплуатации настоящего рентген-аппарата к работе с ним должен иметь допуск только уполномоченный и квалифицированный персонал, предварительно ознакомленный с настоящей инструкцией по эксплуатации.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждающие знаки, встречающиеся в данном руководстве, предназначены для того, чтобы обеспечить корректную работу настоящего изделия, а также для предотвращения нанесения ущерба для здоровья персонала допущенного к работе с ним.

2.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

А) При эксплуатации аппарата

- не превышайте без необходимости время экспозиции при съемке во избежание увеличения радиационной нагрузки
- допускайте к работе с аппаратом только квалифицированных специалистов
- в случае возникновения любых нештатных ситуаций, немедленно прекратите работу с аппаратом
- не решайте самостоятельно проблемы, возникающие с аппаратом, всегда обращайтесь к авторизованному дилеру Вашего региона
- не используйте аппарат в помещениях, где присутствуют следующие факторы:

- наличие химически-активных веществ
- наличие взрывчатых веществ
- повышенная влажность
- прямые солнечные лучи
- недостаточная вентиляция
- рекомендуемые значения температуры и влажности для

нормальной работы аппарата:

- ХРАНЕНИЕ:

- температура – 5°C
- влажность 20 – 70 % RH

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- температура – 10° – 35°C
- влажность – 30 – 85% RH

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

- температура 17° – 25°C
- влажность 40 – 60% RH

Б) При хранении (консервации) аппарата

- аккумуляторные батареи не оставляйте надолго внутри аппарата если не используете его. Храните их отдельно.

2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ

- избегайте физических повреждений аппарата (тряска, удары, давление, падение и т.д.)
- избегайте натяжки шнура зарядного устройства аппарата
- не позволяйте пациентам держать аппарат в руках или прикасаться к нему

ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.3 ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ

- перед началом работы аппарата убедитесь в том, что аккумуляторная батарея заряжена. Для чего открыть отсек для аккумулятора



- вставьте аккумулятор в отсек как показано на фото




И закройте крышку отсека (см. фото)



Теперь можно включить рентген – аппарат.

**Для включения нажимаем и удерживаем около 3 секунд кнопку
ON / OFF**

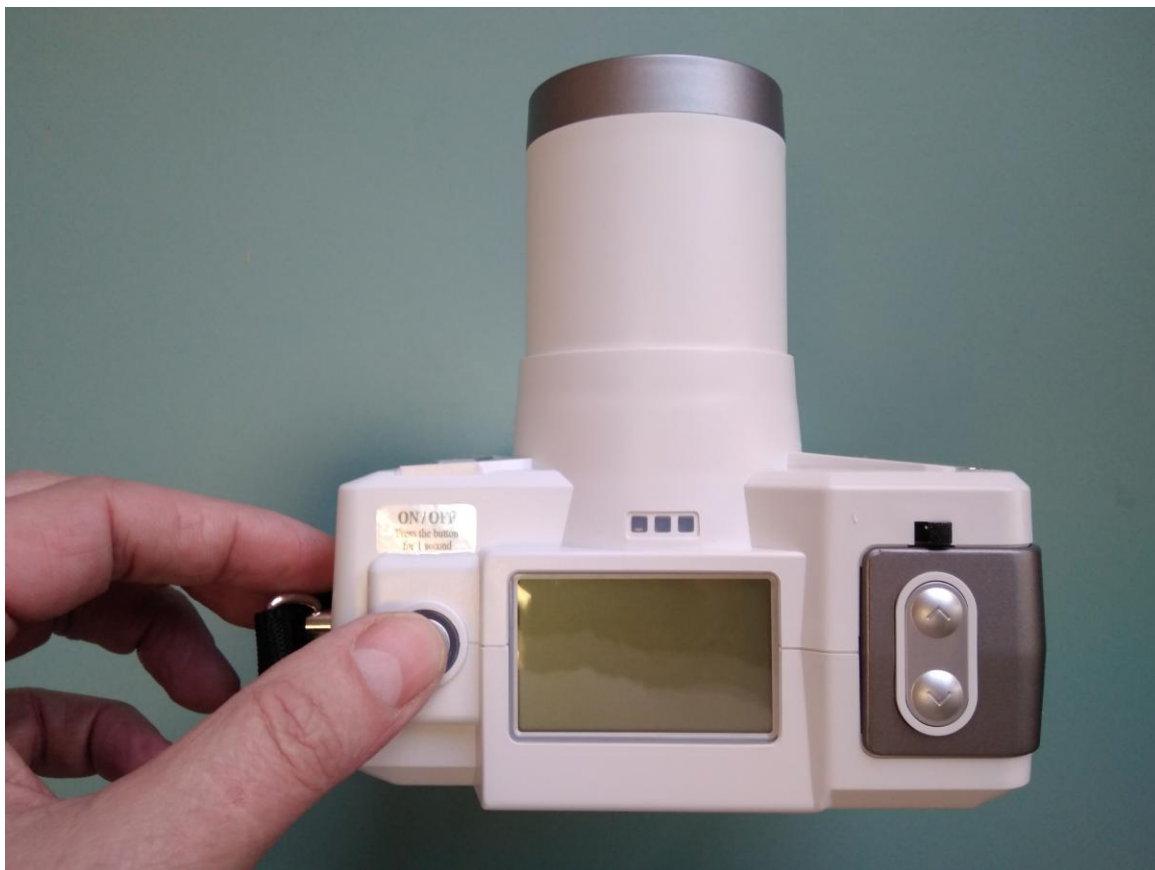

в течении 10 секунд аппарат запускает программное обеспечение



После окончательной загрузке на мониторе мы увидим следующее изображение



Наличие в верхнем правом углу изображение аккумулятора с тремя полосками говорит о полностью заряженном аккумуляторе.

Если мы видим одну или две полоски производитель оборудования РЕКОМЕНДУЕТ перед первым использованием рентген – аппарата произвести полную зарядку батареи. Для этого подключаем сетевой кабель зарядного устройства к блоку питания.

Включение зеленого светодиода сигнализирует о готовности.



Вставляем до щелчка аккумулятор в стойку зарядки и светодиод меняет цвет с зеленого на красный. Это говорит о том, что идет заряд аккумуляторной батареи.



После полного заряда цвет светодиода вновь станет зеленым. Заряд окончен. Легким нажатием заднего фиксатора стойки освобождаем его. Теперь мы имеем полностью заряженный и готовый аккумулятор для работы в портативном рентген – аппарате.

Вновь вставляем батарею в отсек и закрываем его крышку (см. фото вначале). Трехсекундным нажатием на кнопку ON/OFF включаем наш портативный рентген. Теперь он готов сделать около 300 снимков до следующей подзарядке.

Нажатием правыми кнопками вверх или вниз мы можем менять длительность экспозиции рентген облучения.



Теперь мы готовы делать снимок. Обычно при работе с радиовизиографом мы пользуемся следующими экспозициями:

Резцы – 0,10 мск

Премоляры – 0,20 мск

Моляры – 0,25 мск

На практике эти значения весьма условны т.к. зависят от применяемого радиовизиографа или типа пленки. А так же от возраста и массы пациента. Опыт приходит быстро.

Информация ЖК-дисплея аппарата:

- индикация режимов «Ребенок» - «Взрослый»
- индикация времени экспозиции
- индикация уровня заряда аккумуляторной батареи
- индикация групп зубов (резцы, клыки, моляры, премоляры)
- индикация **RIGHT BTN** или **LEFT BTN** – это использованные вами кнопки экспозиции левая или правая.



Это обусловлено, что врач левша или правша. Переключение на нужную кнопку осуществляется микропереключателем.



4. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование оборудования: портативный рентген – аппарат

- **Классификационный номер – A11 080**
- **Тип: класс Б (MDD 93/42/ЕЕС)**
- **Рабочее напряжение – 60 кВ (фиксированное)**
- **Анодный ток – 2 мА**
- **Фокусное пятно – 0,8 мм**
- **Система охлаждения – масляная**
- **Общая фильтрация – 1,5 мм Al**
- **Угол расхождения лучей – 20°**
- **Диапазон выдержек: 0,05 – 1,35 сек.**
- **Фокусное расстояние – 10 см.**
- **Диаметр коллиматора – 5 см**
- **Габариты: 139х163х66,5 мм**
- **Вес аппарата: 1500 гр. (без батареи), 1800 гр. (с батареей)**

Наименование оборудования: аккумуляторная батарея

- **тип: литиевый (полимерный)**

При зарядке:

Напряжение – 14,8 V DC

Температура 0° – 40°С

При работе:

Максимальный ток – 10 мА

Диапазон напряжения – 12 – 16,8 V

Температурный диапазон – 20° – 60°С

Наименование оборудования: зарядное устройство

- Модель: PF435060HP- 4S – 1050 mAh

- входное напряжение – 100 – 250 V AC

- напряжение на выходе – 14,8 V DC

- ток – 1 мА

FOCAL SPOT – ФОКУСНОЕ ПЯТНО



ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ ТАК, КАК УКАЗАНО НА ИЗОБРАЖЕНИИ

Внешний вид рентген – аппарата и его комплектация может меняться без уведомления конечных пользователей данного продукта!

5.1 ЖК-ДИСПЛЕЙ И ЕГО ФУНКЦИИ

Функции ЖК-дисплея и его вид могут изменяться без уведомления конечных пользователей данного продукта!

5.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Верхняя сторона аппарата



Клавиша включения Клавиша управления экспозицией


Передняя сторона аппарата



Клавиша
экспозиции

- для включения/выключения аппарата нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд
- для установки необходимого времени экспозиции используйте клавишу управления экспозицией (24 шага)
- звуковой сигнал воспроизводится только при нажатой клавише экспозиции во время съемки

6. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

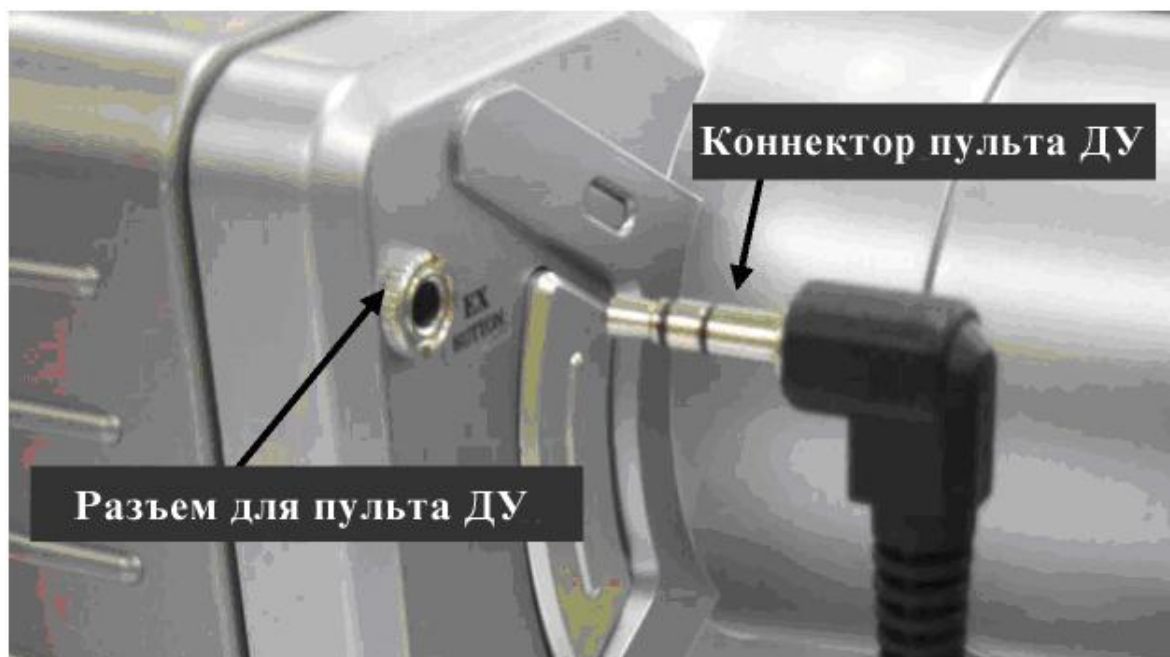

Коннектор пульта ДУ

Разъем для пульта ДУ

Используйте только оригинальный пульт ДУ!



Проведите позиционирование приемника рентгеновского излучения (пленки или датчика радиовизиографа) в ротовой полости пациента. Расположите аппарат в зависимости от вида съемки, которую Вы предполагаете провести. Нажмите клавишу экспозиции на аппарате и удерживайте ее до прекращения звукового сигнала.

7. ВНУТРЕННИЕ НАСТРОЙКИ АППАРАТА (МЕНЮ SET UP)

При одновременном нажатии клавиши включения аппарата и верхней клавиши управления экспозицией Вы можете войти в меню внутренних настроек аппарата





Используя в работе с аппаратом рентгеновскую пленку, придерживайтесь диапазона выдержек от 0,2 до 1,35 секунд.

Используя в работе с аппаратом радиовизиограф, придерживайтесь диапазона выдержек от 0,05 до 1,25 секунд.

Старайтесь избегать в работе аппарата нескольких экспозиций подряд! Это может привести к его перегреву и преждевременному выходу из строя. Старайтесь производить снимки с интервалом около 3 - 5 минут.



8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ АППАРАТА

- Храните аппарат в недоступном для посторонних месте. К работе с аппаратом должны быть допущены только квалифицированные специалисты.

- Периодически протирайте аппарат сухой тканевой салфеткой, особенно коллиматор, так как он может непосредственно контактировать с кожей пациента.

- Не храните аппарат вблизи нагревательных приборов. Любым образом старайтесь избегать нагрева аппарата.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и собирать аппарат. Это должен осуществлять только квалифицированный специалист.

- Если аппарат долгое время не эксплуатируется, извлеките из него аккумуляторную батарею и храните ее отдельно.

- Не оставляйте зарядное устройство аппарата в сети электропитания если в нем нет аккумуляторной батареи

- Для зарядки аккумуляторных батарей используйте только оригинальное зарядное устройство

9. ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ	ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аппарат не включается	Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи и при необходимости замените ее. В случае неэффективности предпринятых мер, обратитесь к компании – поставщику.
Аппарат включается, но в результате съемки снимок не получается	Убедитесь в том, что лучевой поток действительно попадает на пленку (сенсор). Правильно расположите аппарат по отношению к приемнику изображения
Аппарат включается, расположен правильно, но в результате съемки снимок не получается	Не отпускайте сразу после нажатия клавишу экспозиции аппарата. Удерживайте ее в нажатом положении до прекращения звукового сигнала.
Аппарат, не реагирует ни на какие действия. Не включается. Аккумуляторная батарея заряжена	Обратитесь к компании – поставщику.

10. ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Настоящая гарантия распространяется на портативный дентальный рентген-аппарат «DX-3000», а также на отдельные принадлежности, входящие в комплектацию данного аппарата, продаваемые ООО «Мед-Дент», ее торговыми представителями, филиалами, авторизованными продавцами или официальными дистрибьюторами.

Настоящая гарантия действительна во всех регионах, где ООО «Мед-Дент» имеет представителей, обеспечивающих поддержку данного продукта, и где осуществила его продажу. ООО «Мед-Дент» гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в портативном дентальном рентген-аппарате «DX-3000» и всех его компонентов, приобретенных у ООО «Мед-Дент», при условии их правильного использования в строгом соответствии с технической документации и назначением в течение срока действия настоящей гарантии. Срок действия настоящей гарантии начинается с даты приобретения портативного дентального рентген-аппарата «DX-3000» в ООО «Мед-Дент». Подтверждением даты приобретения является акт приема – передачи данного оборудования. При необходимости ремонта (замены) оборудования в течение срока действия настоящей гарантии, гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с положениями и условиями настоящего документа.

Бесплатная техническая поддержка оборудования осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Отсутствие гарантийного талона на оборудование автоматически отменяет настоящую гарантию в ее полном объеме.

Настоящая гарантия распространяется только на первого покупателя портативного дентального рентген-аппарата «DX-3000» и не может быть передана тем владельцам, которые приобрели право собственности на данный продукт у первого покупателя.

В течение гарантийного срока ООО «Мед-Дент» производит ремонт или замену дефектных компонентов и оборудования в целом, в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней. ООО «Мед-Дент» оставляет за собой право по своему усмотрению производить вместо замены изделия возврат уплаченной за него суммы, с учетом амортизации оборудования.

Настоящая гарантия не распространяется на любое оборудование, с которого был удален серийный номер, а также на продукт, который был поврежден или стал неисправным (а) в результате аварии, неправильного использования, злоупотребления или других внешних причин, (б) в результате эксплуатации или обслуживания лицами не прошедшими курс обучения у квалифицированных специалистов ООО «Мед-Дент» и не имеющими документов подтверждающих их квалификацию.

Изложенные выше положения и условия являются полным и исключительным гарантийным соглашением между ООО «Мед-Дент» и

Вами в отношении приобретенного портативного дентального рентген-аппарата «DX-3000». Настоящие положения и условия отменяют все предыдущие соглашения или заверения, в том числе заверения, имеющиеся в рекламных материалах ООО «Мед-Дент», и рекомендации, данные представителями ООО «Мед-Дент» или агентами и сотрудниками ООО «Мед-Дент», которые могли быть сделаны в связи с приобретением портативного дентального рентген-аппарата «DX-3000». Никакие изменения условий настоящей гарантии не являются действительными, если они не были сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем ООО «Мед-Дент».

Если портативный дентальный рентген-аппарат «DX-3000» не работает, как указано в гарантии, единственным и исключительным пределом ответственности является ремонт или замена данного оборудования. По условиям настоящей гарантии максимальная ответственность ООО «Мед-Дент» в явном виде ограничена возмещением суммы, уплаченной за продукт, либо стоимостью ремонта или замены любого компонента оборудования, неправильно работающего при обычных условиях эксплуатации.

ООО «Мед-Дент» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный продуктом или отказом продукта, в том числе за упущенную выгоду, потерянную экономию, случайный или опосредованный ущерб. ООО «Мед-Дент» не несет ответственности по любым искам третьей стороны или предъявляемым покупателем от имени третьей стороны.

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка настоящего, может предоставляться ООО «Мед-Дент» с использованием различных средств связи, включая электронные среды и телефон, в течение всего гарантийного срока. Если сбой в работе продукта произойдет в течение гарантийного периода и решить возникшую проблему при помощи информации, содержащейся в документации по продукту, не удастся, то получить необходимую поддержку можно, обратившись к уполномоченному представителю ООО «Мед-Дент» в Вашем регионе, или напрямую в ООО «Мед-Дент».

Перед обращением в ООО «Компания «Мед-Дент» будьте готовы сообщить серийный номер аппарата и дату его приобретения. Гарантийное обслуживание аппарата не предусматривает выезда к заказчику. Таким образом, Вы самостоятельно должны доставить оборудование в ООО «Мед-Дент» для гарантийного ремонта. В таких случаях необходимо произвести предоплату всех транспортных расходов, налогов и пошлин, связанных с транспортировкой продукта. Кроме того, Вы несете ответственность за страхование отправляемого или возвращаемого продукта и принимаете на себя риск потери при транспортировке. Оборудование для гарантийного ремонта принимается только в полной комплектации.

ООО «Мед-Дент» гарантирует выполнение ремонтных работ при условии, что изделие не имеет внешних дефектов, повреждений корпуса, на котором должны иметься все необходимые пломбы, использовалось только в соответствии с его инструкцией по эксплуатации и не имеет повреждений по причине аварий, неправильного подключения, неправильной эксплуатации, небрежного обращения или самостоятельного ремонта, а также по причинам, возникшим в процессе транспортировки.

**МЫ ИСКРЕННО НАДЕЕМСЯ, ЧТО РАБОТА С ПОРТАТИВНЫМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ РЕНТГЕН-АППАРАТОМ**

«DX-3000»

**ПРИНЕСЕТ ВАМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, А ВАШИМ КЛИЕНТАМ
КРАСИВУЮ УЛЫБКУ И РАДОСТЬ!**

Компания – производитель:

DEXCOWIN
Creative Innovation and Technology

DEXCOWIN Co., Ltd.

197-33 Guro-dong, Guro-gu Seoul, Korea

For service: contact with phone 02-6330-1122

www.dexcowin.com waizei@dexcocosolution.com

Компания – дистрибьютор:

ООО «Мед-Дент»

125167 Россия, Москва

Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, офис 310

Тел: (495) 780-61-62, (925) 514-38-81

ПРИЛОЖЕНИЕ

- 1. Регистрационное удостоверение стр.1**
- 2. Регистрационное удостоверение стр.2**
- 3. Декларация соответствия**
- 4. Гарантийный лист**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2007 года № ФСЗ 2007/00620

На медицинское изделие

**Аппарат рентгеновский стоматологический портативный DEXCO,
модели DX-3000, ADX-4000, с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Эй Си Дентал"
(ООО "Компания "Эй Си Дентал"), Россия,
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3**

Производитель

**"ДЕКСКОВИН Ко., Лтд.", Республика Корея,
DEXCOWIN Co., Ltd., 1102, 3 E&C Venture Dream Tower, 197-33, Guro-dong,
Guro-gu, Seoul, Korea**

Место производства медицинского изделия

**DEXCOWIN Co., Ltd., 1102, 3 E&C Venture Dream Tower, 197-33, Guro-dong,
Guro-gu, Seoul, Korea**

Номер регистрационного досье № 25806 от 09.08.2007

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4220

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 ноября 2007 года № 4085-Пр/07
и приказом от 30 декабря 2016 года № 15734 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0029707

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2007 года № ФСЗ 2007/00620

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат рентгеновский стоматологический портативный DEXCO,
модели DX-3000, ADX-4000, с принадлежностями:**

Принадлежности:

1. Батарея аккумуляторная.
2. Устройство зарядное.
3. Штатив.
4. Пульт дистанционного управления проводной.
5. Экран защитный.
6. Инструкция по эксплуатации и технический паспорт на CD.
7. Цифровой сенсор (для модели ADX-4000).
8. Чемодан.

З

Приказом от 30 декабря 2016 года № 15734 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0030015

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО "Мед-Дент"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1167746737399

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3, офис 309, телефон: +7 (495) 780-61-62, факс: +7 (495) 780-61-62.

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Тагави Рамиз Лятифович

заявляет, что

Аппарат рентгеновский стоматологический портативный DEXCO, модели DX-3000, ADX4000, с принадлежностями:

Принадлежности:

1. Батарея аккумуляторная.
2. Устройство зарядное.
3. Штатив.
4. Пульт дистанционного управления проводной.
5. Экран защитный.
6. Инструкция по эксплуатации и технический паспорт на CD.
7. Цифровой сенсор (для модели ADX-4000).
8. Чемодан.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014: 26.60.11.113

Код ТН ВЭД России: 9022 13 000 0

серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

изготовитель "DEXCOWIN Co., Ltd."

наименование изготовителя

Республика Корея, 1102, 3 E&C Venture Dream Tower, 97-33, Guro-dong, Guro-qu, Seoul, Korea.

страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ ИЕС 60601-1-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013; ГОСТ 30324.32-2002; ГОСТ 31222-2003

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протокола № 528-314-2-17/БР от 27.02.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0002.04ИБР0; регистрационного удостоверения: Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2007/00620 от 22 ноября 2007 года. Срок действия не ограничен.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 28.02.2017

Декларация о соответствии действительна до 27.02.2020

М.П.

Тагави Рамиз Лятифович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года.

Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 28.02.2017, регистрационный номер РОСС KR.АГ81.Д05696

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

Е.В. Волганкина

(инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица))



Гарантийный талон

Наименование: Портативный рентген-аппарат DX-3000

Серийный номер: вводится в базу данных по складу на момент отгрузки

Модель: Dexcowin DX-3000

Дата отпуска товара со склада считается началом гарантийного срока

В случае обнаружения в изделии дефекта, в течение гарантийного срока ООО «Мед-Дент» гарантирует выполнение бесплатного ремонта изделия или его частей. ООО «Мед-Дент» гарантирует выполнение ремонтных работ при условии, что изделие использовалось только в соответствии с его заводской инструкцией по эксплуатации и не имеет повреждений по причине аварий, неправильного подключения, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неправильной регулировки или самостоятельного ремонта, а также по причинам, возникшим в процессе транспортировки, неправильной установки, освоения.

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется покупателем. Изделия для гарантийного ремонта принимаются только в полной комплектации.

Гарантийный срок 24 месяца со дня отпуска товара со склада.

Двадцать четыре месяца
(гарантийный срок прописью)

Адрес:

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, офис 309
ООО «Мед-Дент»
Тел. (495) 780-61-62

Продавец ООО «МЕД-ДЕНТ»

М. П.

Изделие принято на гарантийное обслуживание

